


# ANALE AFNAME

Instructie voor anale afname.  
Lees deze instructie goed!

## 1 Dit heb je nodig



Bekijk hier de  
instructievideo

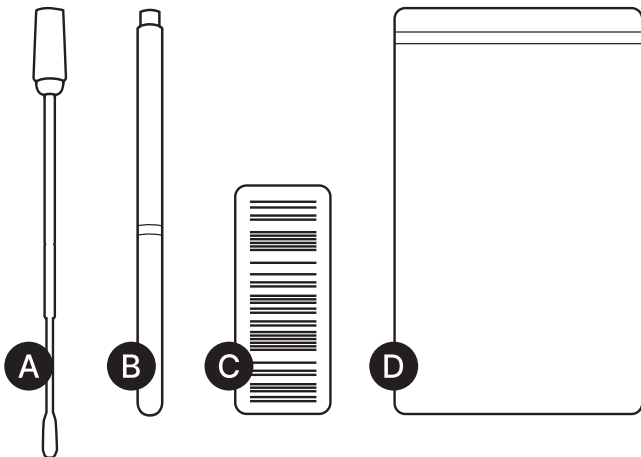


A. Wattenstaaf  
B. Testbuis

C. Barcode sticker  
D. Safety bag

# ANALE AFNAME

Instructie voor anale afname.  
Lees deze instructie goed!

## 2 Zo doe je de test

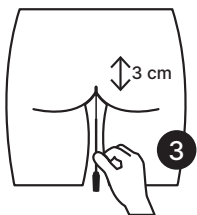

1. Pak de lange buis met rode dop. Besticker het met de **groene sticker** voor **anale afname**.
2. Draai de dop van de buis en neem de wattenstaaf (*die vastzit aan de dop*) tussen duim en wijsvinger.
3. Breng de wattenstaaf 3 centimeters in de anus en strijk daarmee gedurende 30 seconden langs de anuswand.
4. Plaats de wattenstaaf terug in de buis en klik de dop vast.
5. Controleer nogmaals of de buis de juiste sticker bevat. Plaats daarna de buis in de bijgevoegde safety bag. Sluit deze nog niet indien je meerdere samples wil toevoegen.