


HERPES / SYFILIS

Instructie voor afname van blaasje of
vocht uit blaasje op de huid.

1 Dit heb je nodig

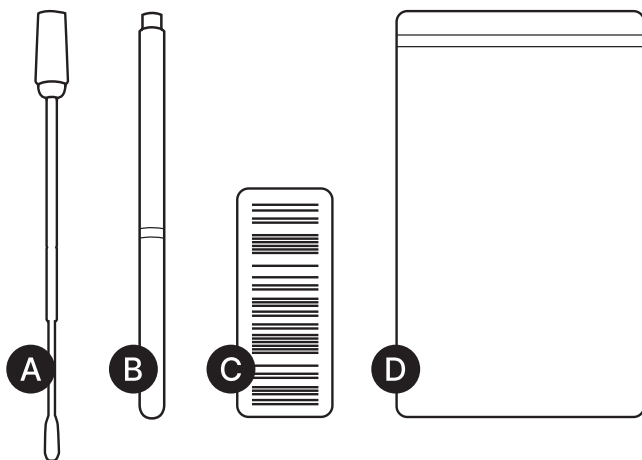

A. Wattenstaaf
B. Testbuis

C. Barcode sticker
D. Safety bag

HERPES / SYFILIS

Instructie voor afname van blaasje of
vocht uit blaasje op de huid.

2 Zo doe je de test

1. Pak de lange buis met [rode, roze, witte] dop. Besticker het met de **paarse sticker** voor **huid afname**.
2. Draai de dop van de buis en neem de wattenstaaf (die vastzit aan de dop) tussen duim en wijsvinger. Plaats de buis in de houder.
3. Veeg enkele malen langs (het vocht uit) één of meerdere blaasjes en/of korstjes op de huid.
4. Plaats de wattenstaaf terug in de buis en klik de dop vast.
5. Controleer nogmaals of de buis de juiste sticker bevat. Plaats daarna de buis in de bijgevoegde transportverpakking. Ga eventueel door naar de volgende afname.