


URINE

Instructie voor urine afname.
Lees deze instructie goed!

1 Dit heb je nodig



Bekijk hier de
instructievideo

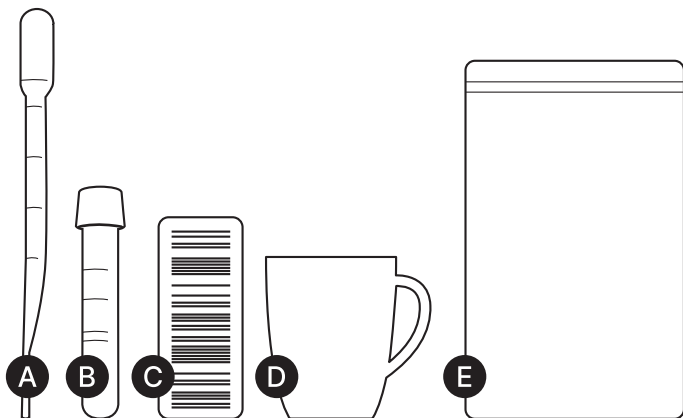

A. Pipet

B. Testbuis

C. Barcode sticker

D. Glas of mok

(niet inbegrepen)

E. Safety bag

URINE

Instructie voor urine afname.

Lees deze instructie goed!

2 Zo doe je de test

1. Pak de korte buis met gele dop. Besticker het met de **gele sticker** voor **urine afname**.
2. Draai de dop van de buis.
3. Ga naar het toilet en vang je eerste straal urine op in een glas of mok. Plas de rest uit in het toilet.
4. Neem de pipet tussen duim en wijsvinger. Knijp in het bovenste gedeelte en houd dit vast terwijl je de pipet in de urine brengt. Laat het bovenste gedeelte dan voorzichtig los; zodat de pipet de urine opzuigt.
5. Breng de urine uit de pipet over in de gele buis door in het bovenste gedeelte te knijpen. Herhaal de voorgaande stap nog enkele malen tot de buis gevuld is tussen de zwarte strepen.
6. Draai nu de dop terug op de buis.
7. Controleer nogmaals of de buis de juiste sticker bevat. Plaats daarna de buis in de bijgevoegde transportverpakking. Ga eventueel door naar de volgende afname.