

Instructies ^{NL}

Account aanmaken & kit activeren



Speeksel verzamelen



Verzenden naar laboratorium



Begin
hier



Start



Scan de QR code of ga naar
easly.nl om de test te
activeren.

Activatie code:

Let op: Zonder activatie krijgt u geen resultaat!

**Komt u er niet uit neem dan contact met ons
op en wij helpen u verder:**
085-760 39 53 / info@easly.nl

Activering van de DNA-Speekselkit



1

**Scan de QR code of ga naar
easly.nl om de test te
activeren.**

**Maak eerst een account aan
en onderteken het
toestemmingsformulier.**

Let op: Account moet op naam van de
patient aangemaakt worden!

2


**Vervolledig uw gezondheidsprofiel.
(optioneel)**

Mocht u problemen ondervinden bij
het activeren van de kit, neem dan
alstublieft contact met ons op via
085-7603953 of info@easly.nl



Speekselafname

3

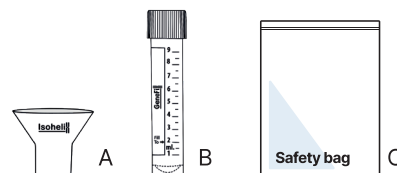

Dit heeft u nodig:

- Trechter (A)
- Speekselbuis (B)
- Safetybag (C)


Voorzorgsmaatregelen afname.

- De set voor het verzamelen van het monster
is bedoeld voor eenmalig gebruik.
- Gebruik de kit niet als de verpakking
is beschadigd of als de houdbaarheidsdatum
is overschreden.
- Open de test kit pas vlak voor gebruik.
- **Wacht na het eten, drinken, roken of het
kauwen van kauwgom 30 minuten voordat
u speeksel verzamelt.**

Ga verder op achterzijde -->


- 4 Haal de speekselbuis en trechter uit de verpakking, Verwijder het dopje van de speekselbuis (Bewaar deze voor later) en draai de trechter op de speekselbuis.

- 5 Spuug in de trechter tot de hoeveelheid vloeibaar speeksel (zonder bellen) de vullijn (2ml) heeft bereikt.

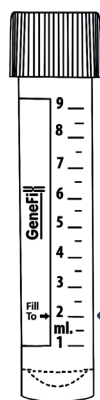


Vullijn


- 6 Houd het buisje rechtop en schroef de trechter van het buisje, deze kunt u weggoien.

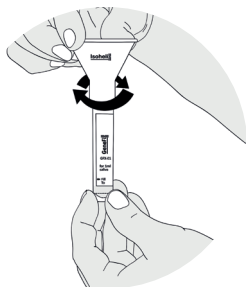

- 7 Sluit het buisje stevig door het dopje (van stap 4) er weer op te draaien.

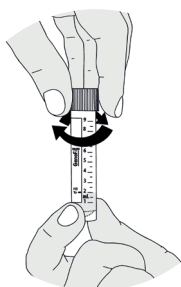

- 8 Schud het buisje met het dopje erop gedurende 5 seconden.

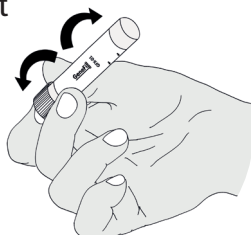


Verpakking en Verzending



- 9 Het buisje met het dopje erop in de safety bag stoppen.

Trek de plakrand los en sluit de safety bag.

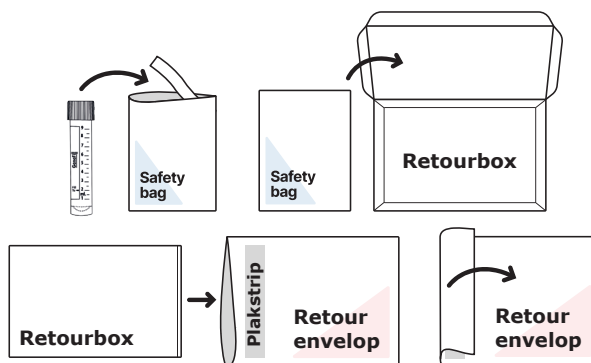


- 10 Stop de safetybag en de het ondertekende toestemmingsformulier in de retourbox.

Stop de retourbox in de verzendenvelop en sluit de envelop door de zilveren plakstrip los te trekken.

- 11 Breng de retourbox met de zelftest direct na afname naar een brievenbus van PostNL

LET OP: controleer of de brievenbus dezelfde dag wordt leeggemaakt

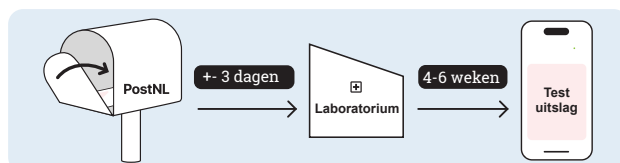

- 12 Het resultaat verschijnt 4 tot 6 weken na ontvangst door het laboratorium in uw persoonlijke dashboard op de website. U zult van ons ook een mail ontvangen.

De uitslag wordt ook gedeeld met de aanvrager van de test.

Let op: het rapport vormt geen medisch advies. Wijzig of stop niet met het innemen van medicatie zonder uw arts te raadplegen.

Distributeur:
easly
www.easly.nl

CE M D I 15 °C / 30 °C

Manufacturer:
Isohelix UK
www.isohelix.com

CE M D I 15 °C / 30 °C